


NEOLIX

Safe
Simple
& Smart

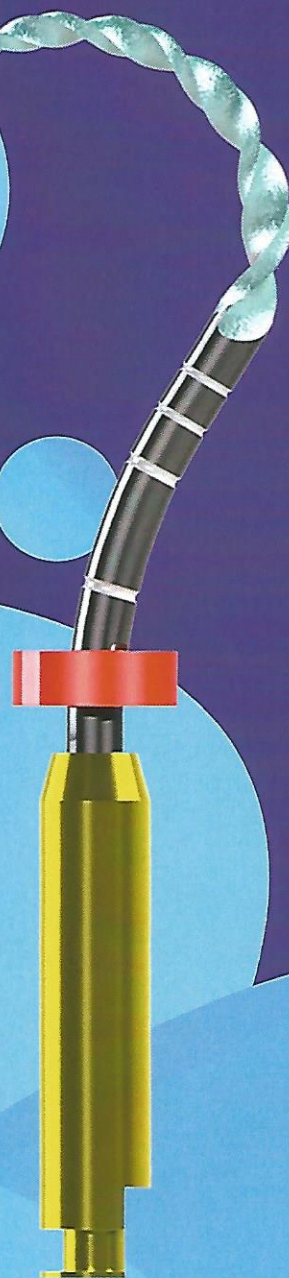

neoniti

SINGLE NITI ROTARY FILE



Proceso exclusivo

Nuestro innovador proceso EDM permite fabricar una nueva lima de NiTi cuya característica es única y superior. La lima es en general más flexible, aun siendo su superficie especialmente dura y naturalmente áspera. Gracias a esta exclusiva combinación de características y de su corte transversal rectangular, NEONITI presenta una capacidad de corte superior y una flexibilidad progresiva, dando como resultado una incomparable EFICIENCIA DE CORTE Y RESISTENCIA A LA FRACTURA.



Ventajas

- Efecto Anti-atornillado
- Alta eficiencia de corte
- Alta resistencia a la fractura.
- Limpieza eficiente hasta el ápice.
- Permite tratamiento endodóntico o retratamiento.
- Una sola lima para un tratamiento completo.
- También es adecuado para canales difíciles (delgados, curvos, calcificados)
- Se puede precurvar para acceso difíciles
- Respeta de la anatomía del canal

Uso recomendado

- Rotación continua
- Velocidad 300 - 500 rpm.
- Torque Límite 1.5 N. cm
- Irrigación Constante
- Limpie a menudo la lima

Relleno de Canal


Recomendamos usar los conos de guttapercha
Tamaño n° 25 - Taper .06

Para más información

Por favor refiérase a la instrucción manual

	C1	GPS	A1	A1	A1
Size	n°25	n°15	n°20	n°25	n°40
Taper	.12	.03	.06	.06	.04
Available lengths	(L15)	15mm	-	-	-
	(L21)	-	21mm	21mm	21mm
	(L25)	-	25mm	25mm	25mm
	(L31)	-	31mm	31mm	31mm

Información de Diseño

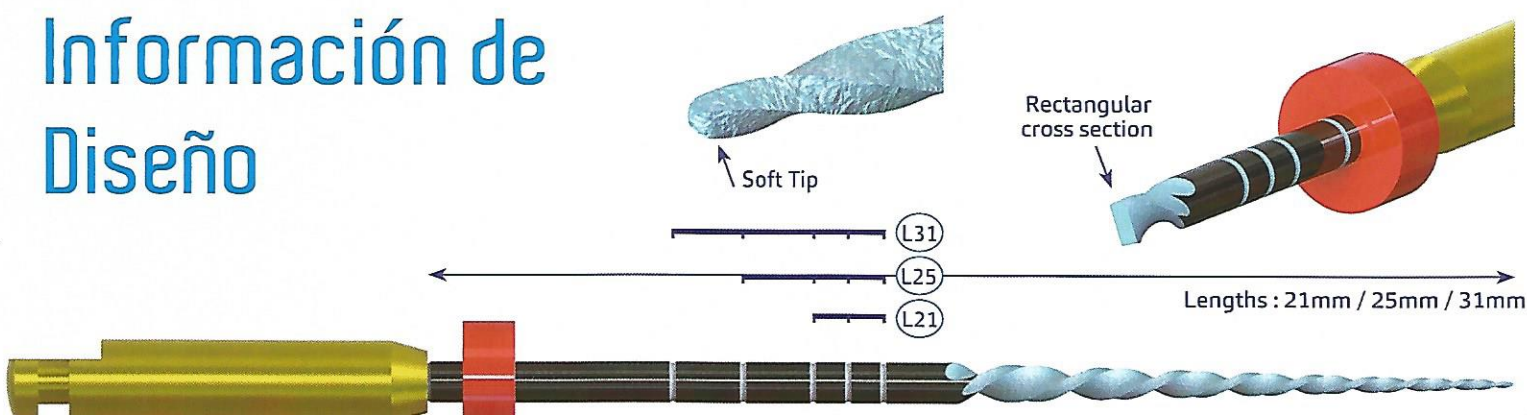

PRINCIPIO DE FABRICACIÓN

El proceso de fabricación único en el mundo basado en ELECTRIC DISCHARGE MACHINING (EDM)



FLEXIBILIDAD PROGRESIVA

BORDES DE CORTES Duros

SUPERFICIE ABRASIVA




El proceso EDM consiste en la generación de una descarga producido por alta energía y alta frecuencia eléctrica entre la pieza de metal (lima neoniti) y un electrodo. Esto lleva a fundir y evaporar localmente la pieza de trabajo, lo que da como resultado la geometría deseada del producto terminado.

Protocolo Simple

1 Make the glidepath

- Prepare the access cavity.
- Establish WL and make the canal patency with K6, K8, K10 or K15 file.

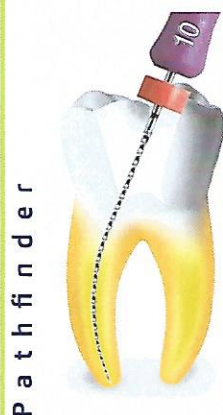


GPS n°15



Optional:
in case of
difficult patency.

2 Widen the canal orifice


- Remove dentine interference
- Circumferential brushing action.

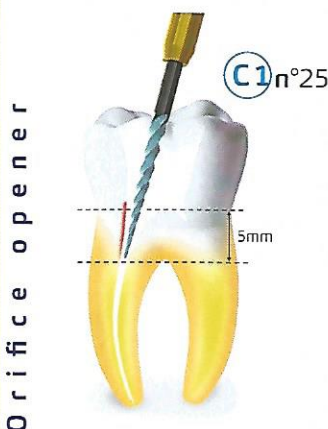

3 Shape the canal to the WL

- Take A1 to the middle third using 3 or 4 circumferential brushing actions.
- Confirm WL again with a K file.
- Take A1 to WL using a pecking motion

A1 n°20

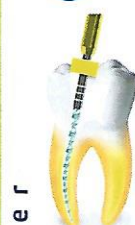

Optional:
to shape
difficult canals.

A1 n°25



A1 n°40



Optional:
to finish
large canals.


Información de Producto

REFILL PLATES

C1 n°25/.12

Orifice opener

(L15)

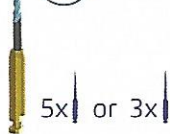


5x | or 3x |

GPS n°15/.03

Pathfinder

(L21) or (L25) or (L31)

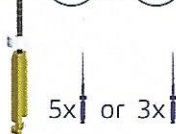


5x | or 3x |

A1 n°20/.06

Shaper
for difficult canals

(L21) or (L25) or (L31)

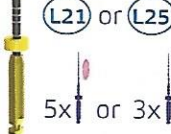


5x | or 3x |

A1 n°25/.06

Shaper

(L21) or (L25) or (L31)

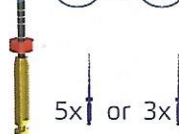


5x | or 3x |

A1 n°40/.04

Finisher for
large canals

(L21) or (L25) or (L31)

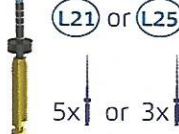

5x | or 3x |

ASSORTMENTS

Assorted kit

(L21) or (L25)

Except C1

(L15)



Intro kit

(L21) or (L25)

Except C1

(L15)




Safe, Simple & Smart



Adecuado para canales difíciles

neoniti

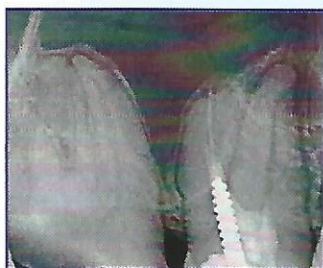

No. 15 & 16 (treatment and retreatment)
Dr. Arnaud Stanurski - Paris (France)



No. 16 (retreatment)
Dr. Arnaud Stanurski - Paris (France)




No. 17
Dr. Cyril Biesse - Bordeaux (France)




No. 37
Dr. Stefan Jitaru - Bucarest (Romania)



No. 46
Dr. Edit Maros - Laval (France)

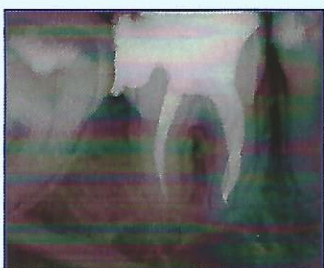

No. 37
Dr. Jiri Skrland - Prague (Czech Republic)

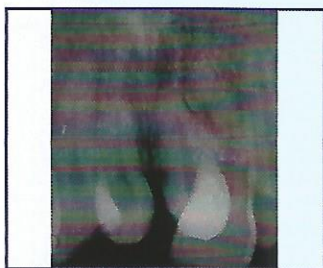

No. 21
Dr. Ali Afzal - Udaipur (India)



No. 27
Dr. Mohsen Aminsobhani - Tehran (Iran)



Safe, Simple & Smart



Environment friendly - Manufactured in closed circuit clean water.
Oil free process prevents the spoilage of environment and operators health.
Made in France – Neolix is certified **ISO 13485**
Neolix instruments are Class IIa medical devices certified by the notified body **GMED** (CE 0459).

REPRESENTADO Y DISTRIBUIDO POR BARMERO CHILE